

# Antifaz Hidrocalor

RELLENO MINERAL NATURAL.  
10 MINUTOS DE CALOR TERAPÉUTICO.

Antifaz con tecnología patentada Hydroblock (calor húmedo): el relleno mineral natural bloquea el calor y la humedad, concentrando el efecto térmico deseado en los párpados del paciente, obteniendo el efecto terapéutico deseado, favoreciendo la secreción de las Glándulas de Meibomio y aumentando el flujo sanguíneo en todo el tejido que las rodea. El relleno mineral es el secreto de esta patente: permite mantener el calor hasta 10 minutos.

*“ Calor húmedo para el tratamiento integral de la Enfermedad del Ojo Seco con Disfunción de Glándulas de Meibomio. También frío húmedo analgésico para la descongestión y relajación del ojo y del área periocular”*

- Dra. M<sup>a</sup> Ángeles del Buey,  
Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa y Grupo ARAVIS.

ALMOHADILLA ELÁSTICA QUE SE AMOLDA PERFECTAMENTE A LA NARIZ, FORRADA DE SILICONA, PARA UN AJUSTE PERFECTO Y COMODIDAD. FUNDA EXTRA SUAVE ANTIMICROBIANA LAVABLE A MÁQUINA O A MANO.



## INDICACIONES DE USO

El Antifaz Hidrocalor de OcuSci se puede usar caliente o frío.

## EN CALIENTE

Alivia los síntomas de los pacientes que sufren:

- Enfermedad del Ojo Seco, Blefaritis, Disfunción de Glándulas de Meibomio, Orzuelos o cualquier otra patología de la superficie ocular.
- Alivia ojos irritados y con dolor.

## EN FRIO

Alivia los síntomas de pacientes que sufren:

- Alergias
- Dolores de cabeza
- Migrañas
- Ojos cansados, con picor, hinchados o con dolor

Ideal para usar en combinación con suplementos de Omega-3 Solana.<sup>1</sup> 5 minutos diarios de Antifaz Hidrocalor y 2 cápsulas de Omega-3 Solana durante 30 días.

1. Will Smith, OD; David McMahon, MBA, MS; Maria Nymark, PhD.  
Novel Therapy for Dry Eye Disease. ISSN#1078-6791

# Antifaz Hidrocalor con USB

## INSTRUCCIONES DE USO

Calentar 20 segundos en el microondas a máxima potencia (800 W). Antes de colocar sobre los ojos, se recomienda comprobar la temperatura con los dedos. No exceder el máximo de 30 segundos en el microondas. El antifaz retiene el calor durante 30 minutos. Si se usa de nuevo durante esos 30 minutos, reducir el tiempo de microondas a 10 segundos. Para obtener mayor eficacia, se recomienda aplicar el antifaz sobre los ojos durante 5 minutos cada tratamiento. La funda del antifaz es apta para uso en el microondas y para mantenerla en el congelador. También se puede calentar en el horno de 4-6 minutos a 115°C.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

La funda puede lavarse a máquina, usando el ciclo suave y temperatura fría. Secar al aire. El antifaz se debe lavar a mano usando un detergente suave y agua fría. No introducir en secadora. Se recomienda lavar inmediatamente si es expuesto a comida, aceites, grasa u otra suciedad.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Medidas: 22 cm largo x 8 cm alto
- Se entrega empaquetado en caja rígida
- Opción de imprimir con logo propio.



- IDEAL PARA PACIENTES QUE NO TIENEN MICROONDAS NI HORNO. PERSONAS QUE PASAN MUCHAS HORAS FUERA DE CASA VIAJANDO O EN LA OFICINA. SE CALIENTA GRACIAS A SU CONECTOR USB.
- FÁCIL Y CÓMODO A TODAS HORAS. DISPONE DE 3 OPCIONES DE TEMPORIZADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, PARA QUE EL USUARIO ELIJA EL TIEMPO Y LA TEMPERATURA QUE DESEE.

**l'acuité**  
Para tus Ojos



LACUITE LU, SLU | Avenida de la Industria, 8 Nave 3 | 28108 Alcobendas | Madrid  
T 910 697 453 | M 649 095 338 | E info@lacuite.com

[www.lacuite.com](http://www.lacuite.com)